




SIDLY CARE | PRO

3.0 versija nuo 2025 m. rugpjūčio 20 d.

1 žingsnis

**Prieš naudojimą visiškai įkraukite įrenginį
(maždaug 3 valandas)**

Prijunkite įkrovimo stotelės kištuką į elektros lizdą, tada uždėkite apyrankę ant stotelės taip, kad raudonas taškas apyrankės vidinėje pusėje ir raudonas taškas ant įkrovimo pagrindo būtų sulygiuoti.

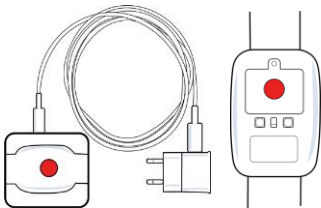

Kraunama



Mygtukas šviečia raudonai ir žaliai.

Baterija įkrauta




Mygtukas šviečia žaliai – galite naudoti apyrankę.

2 veiksmas

Užsekite apyrankę ant rankos virš riešo

Pastaba: Tinkamai dėvima apyrankė turėtų būti 2–3 cm virš riešo kaulo. Tai užtikrins geriausią matavimo kokybę.

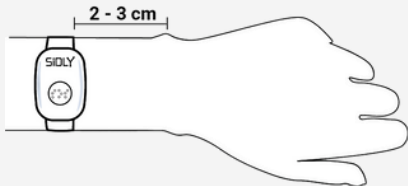

3 veiksmas

Nuo šiol galite naudotis visomis „SiDLY“ įrenginio ir sistemos funkcijomis.

Apyrankė padės pasirūpinti Jūsų saugumu:



SOS
mygtukas



saturacijos ir
širdies ritmo
matavimai



kritimo
detektorius



dvipusis
bendravimas



vietos
nustatymas

4 žingsnis



Kilus pavojui gyvybei ar sveikatai, stipriai paspauskite SOS mygtuką ir palaikykite jį maždaug 2 sekundes.

- išgirsite pranešimą: „Siunčiama SOS žinutė“.
- mygtukas užsidegs raudonai,
- pagalbos pranešimas bus išsiųstas numatytuoju pagalbos telefono numeriu



Prisiminkite!

Visada dėvėkite apyranę. Nuimkite ją tik maudantis ar įkraunant.

Apyrankė turėtų tvirtai, bet patogiai priglusti prie rankos. Apyrankę nešiojant per laisvai, matavimai gali būti netikslūs.

Reguliariai įkraukite savo apyranę padėdami ją ant įkrovimo stotelės.



Perskaitykite instrukcijas

Jei kyla problemų dėl „SiDLY Care PRO“ apyrankės veikimo, žr. išsamų naudotojo vadovą, kurį rasite adresu

<https://sidly.eu/manual/CarePRO-medPL.pdf>

Šis greito paleidimo vadovas nepakeičia viso naudotojo vadovo, tačiau jis labai palengvins jums produkto naudojimą.








Jei turite klausimų, susisiekite
su mumis el. paštu:

helpdesk@sidly.org

Pastaba: Apyrankė skleidžia šviesos ir garso signalus, kad informuotų jus apie įrenginio būseną ir veikimą.

Šviesos signalai (aliarmo mygtuko apšvietimas).

Mirksintis šviesos diodas:

-  įrenginys veikia tinkamai
-  apyrankė įkrauta, prastas GSM tinklo ryšys
-  žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis
-  žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis ir prastas GSM tinklo ryšys
-  programinės įrangos atnaujinimas; palikite įrenginį prijungtą prie įkroviklio, kol apšvietimo spalva pasikeis į žalią